

PLATEFORME DE CYTOGENETIQUE  
UMR 1388-GenPhySE  
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE  
23, Chemin des Capelles BP 87614  
31076 TOULOUSE Cedex

Tél : 05.61.19.39.53

[labocyto@envt.fr](mailto:labocyto@envt.fr)

1) S'assurer que vous avez le matériel tubes bouchons VERTS contenant de l'héparine de lithium ou de sodium, et la fiche de commémoratifs. Si besoin, contacter le laboratoire pour vous en procurer.



**Pas de tube EDTA**

2) Prévoir le prélèvement de préférence en début de semaine. Réaliser le lundi, mardi, mercredi et poster dernier délai jeudi matin en CHRONOPOST.

3) Faire appel à votre vétérinaire.

4) Prélèvement STERILE : nettoyer et désinfecter très soigneusement le lieu de ponction. Cette mesure est impérative pour la réussite de l'analyse (culture cellulaire).

Pour les bovins : prélever à la veine jugulaire

5) Identifier les tubes et remplir INTEGRALEMENT la fiche de commémoratifs par animal qui servira par la suite de certificat. La faire signer et tamponner par le préleveur.

6) Envoyer le jour même au laboratoire par CHRONOPOST bien emballé.  
Pas de frigo, pas de glace, à l'abri de la chaleur et du froid. Isoler des températures extrêmes (période de grand froid et canicule).

7) Joindre le chèque avec le prélèvement à l'ordre de :

L'Agent comptable de l'ENVT

TARIF : 50 Euros TTC par animal

Le chèque ne sera encaissé qu'après réception de la facture.

Les analyses inexploitablees ne vous seront pas facturées.

**AUCUN RESULTAT NE SERA DELIVRE AVANT RECEPTION DU REGLEMENT**