

**PLATEFORME DE CYTOGENETIQUE
UMR 1388-GenPhySE
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE
23, Chemin des Capelles BP 87614
31076 TOULOUSE Cedex**

Tél : 05.61.19.39.53
labocyto@envt.fr

1) S'assurer que vous avez le matériel tubes bouchons VERTS contenant de l'héparine de lithium ou de sodium, et la fiche de commémoratifs. Si besoin, contacter le laboratoire pour vous en procurer.



Pas de tube EDTA

2) Prévoir le prélèvement de préférence en début de semaine. Réaliser le lundi, mardi, mercredi et poster dernier délai jeudi matin en CHRONOPOST.

3) Prélèvement STERILE : nettoyer et désinfecter très soigneusement le lieu de ponction. Cette mesure est impérative pour la réussite de l'analyse (culture cellulaire).

4) Identifier les tubes et remplir INTEGRALEMENT la fiche de commémoratifs qui servira par la suite de certificat. La faire signer et tamponner par le préleveur. Merci de préciser si c'est un 2^{ème} prélèvement.

5) Envoyer le jour même au laboratoire par CHRONOPOST bien emballé. Pas de frigo, pas de glace, à l'abri de la chaleur et du froid. Isoler des températures extrêmes (période de grand froid et canicule).