

PLATEFORME DE CYTOGENETIQUE  
UMR 1388-INRAE-ENVT-GenPhySE  
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE  
23, Chemin des Capelles BP 87614  
31076 TOULOUSE Cedex

Tél : 05.61.19.39.53

[labocyto@envt.fr](mailto:labocyto@envt.fr)

[www.envt.fr](http://www.envt.fr) : rubrique « Recherche / Plateformes techniques »

1) S'assurer que vous avez le matériel **tubes bouchons VERTS** contenant de l'héparine de lithium ou de sodium, et la fiche de commémoratifs. Si besoin, contacter le laboratoire pour vous en procurer.



**Pas de tube EDTA**

2) Prévoir le prélèvement de préférence en **début de semaine**. Réaliser le lundi, mardi, mercredi et poster dernier délai jeudi matin en **CHRONOPOST**.

3) Faire appel à votre vétérinaire.

4) Prélèvement **STERILE** : nettoyer et désinfecter très soigneusement le lieu de ponction. Cette mesure est impérative pour la réussite de l'analyse (culture cellulaire).

**Pour les bovins** : prélever à la veine jugulaire

**Pour les sangliers** : prélever à la veine jugulaire, saphène ou radiale.

5) **Identifier les tubes** et remplir **INTEGRALEMENT** la fiche de commémoratifs **par animal** qui servira par la suite de certificat. La faire signer et tamponner par le préleveur. **Si le tube de prélèvement n'est pas identifié ou n'est pas correctement identifié, même pour une demande d'analyse unique, le prélèvement sera considéré non conforme et l'analyse ne sera pas effectuée.**

6) Envoyer le jour même au laboratoire par **CHRONOPOST bien emballé**. Pas de frigo, pas de glace, à l'abri de la chaleur et du froid. Isoler des températures extrêmes (période de grand froid et canicule).

**TARIF** : 38 Euros TTC par animal à payer **à réception de la facture**.

**La facture sera établie au nom du propriétaire de l'animal.**

Les analyses inexploitablees ne vous seront pas facturées.